

EIP 2

Pompe à irrigation Erbe EIP 2 :
bonne visibilité du tissu ciblé



Plus de sécurité lors des interventions endoscopiques

Une bonne visibilité pour le diagnostic et le traitement

L'utilisation de la pompe à irrigation EIP 2 permet un nettoyage efficace du tissu ciblé par l'élimination d'éventuels substances organiques résiduelles, de coagulum ou de sang. L'instrument EIP 2 peut être activé pour le rinçage dans le cadre du diagnostic ou de la thérapie, ce qui permet de supprimer l'utilisation d'un cathéter de rinçage supplémentaire.



Après rinçage de la paroi de l'organe, on obtient une bonne visibilité du tissu ciblé et une meilleure application chirurgicale HF

Les avantages de l'irrigation

Les effets d'adhérence sur les tissus humides rincés sont réduits lors de la coupe et de la coagulation chirurgicale HF. Le rinçage permet aussi de mieux repérer les sources d'hémorragie et ainsi de pouvoir les coaguler de manière efficace et ciblée.

La pompe EIP 2 Erbe est activée par la pédale ou directement sur l'appareil. La touche de raccourci en façade permet de régler trois niveaux de puissance de rinçage différents : 30 % (standard), 50 % ou 80 % qui peuvent être modifiés et sauvegardés de manière individuelle.

Un adaptateur de rinçage permet de raccorder directement le jeu de tubulures au canal des instruments de l'endoscope. Il est donc possible de procéder au rinçage sans changement d'instrument, même si celui-ci est déjà introduit.



Données techniques

EIP 2

N° 10325-000	Type de pompe	Pompe péristaltique à rouleaux
	Mode	Continu

Fonctionnement

Activation	Commande par pédale ou par bouton en façade de l'appareil
Débit	Variable, réglable sur le panneau frontal de l'EIP 2. 3 réglages de puissances possibles – (par ex. 30, 50, 80 %)
Débit maximum avec jeu de tuyaux	500 ml/min correspond à une valeur affichée de 100 %

Raccordement électrique

Tension secteur	220 – 240 V~
Fréquence secteur	50 Hz

Classification

Classe de protection	Classification selon EN IEC 60601-1 : classe I, type CF
Classification des produits médicaux	Classification selon directive CE 93/42/CEE : IIa

Accessoires

Pédale simple	20325-000
Jeu de tuyaux pour pincettes à irrigation	20325-020
Jeu de tuyaux pour endoscope flexible avec raccord Luer Lock	20325-001
Adaptateur de rinçage pour Olympus, Fujifilm G5, STORZ	20325-003
Adaptateur de rinçage pour Fujifilm	20325-004
Adaptateur de rinçage pour PENTAX	20325-005



Erbe Medical S.à.r.l.
Z.A.C. Sans Souci
470 Allée des Hêtres
F-69760 Limonest
Tél 04 78 64 92 55
Fax 04 78 66 16 43
erbe@erbe-france.com
erbe-france.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Allemagne
Tél +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com